

woson[®] RX




f DNA Dental
dnadental.py
0981-650-152

Panchito Lopez 943-Lambare


Descripcion Rayos X –Movil /Portatil

Guia Rapida V2.1 *Espanhol

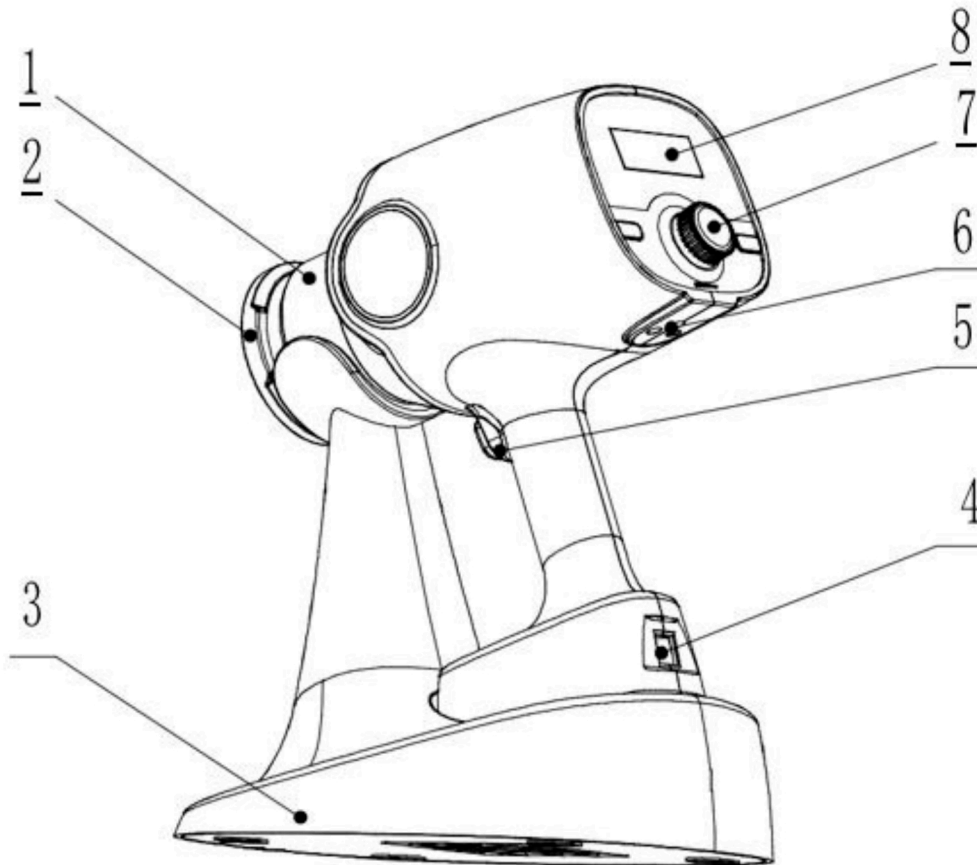

N#	Nombre	Descripcion
1	Limitador de Rayos X Colimador	Hebilla Giratoria
2	Limitador de Rayos X final	Limita el rango de exposicion de los rayos
3	Base	Soporte base apyo seguro * Puede soportarse sin esta base Peso 1,5Kg.
4	Toma de Carga	Toma de carga 20V 50-60Khz
5	Clave de disparo	Disparo voluntario presion contastante hasta 2 Segundos o a timpo programado
6	Interfaz de soporte	Soporte para tripode u soporte externo
7	Joystick de programacion	Programacion de tiempo
8	Pantalla LCD	Indica los parametros de exposicion


Panel de control

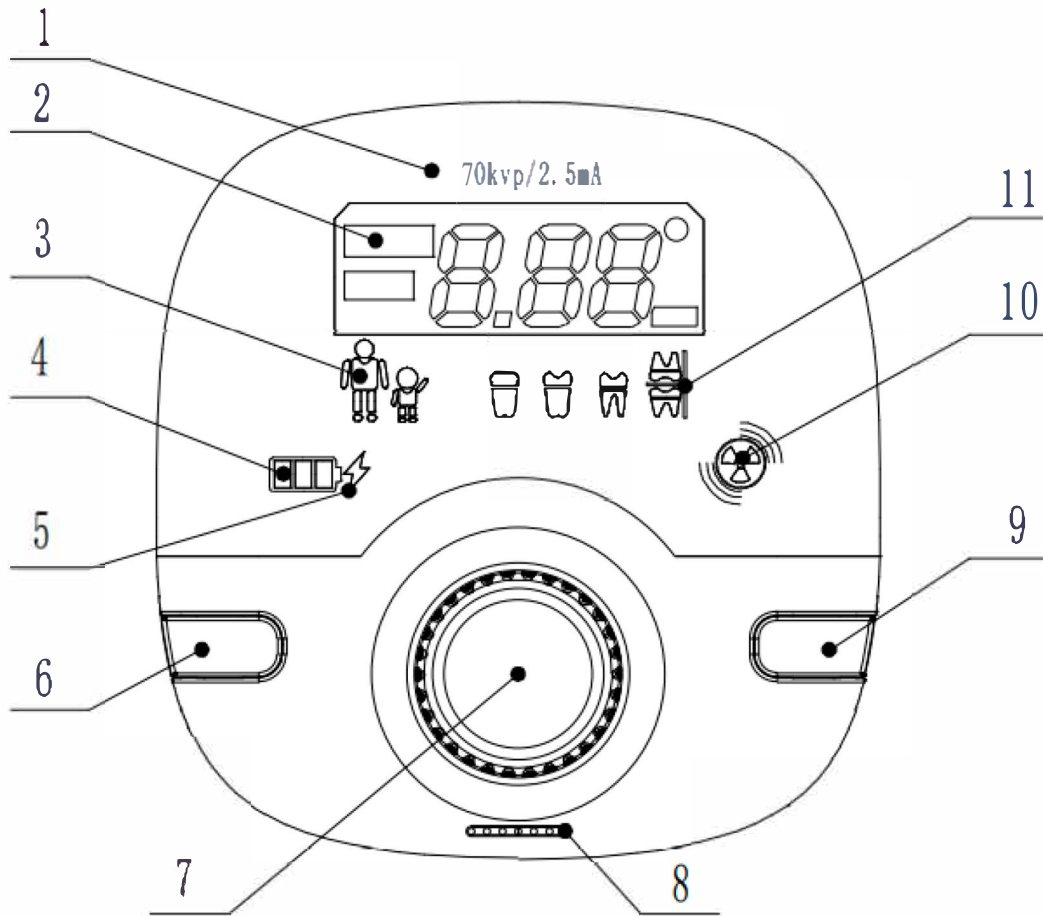

Nro.	Nombre	Descripcion
1	Voltaje del tubo Indication de corriente	Indica el voltaje y la corriente del equipo
2	Angulo / tiempo	Muestra el tiempo de exposicion del equipo, codigo de error
3	Opcion Adulto / Niño	Selecciona el tipo de paciente (adulto o niño)
4	Indicador de bateria	Indica la bateria restante actual del equipo
5	Indicador de carga de bateria	La luz roja indica que la bateria restante es insuficiente y necesita ser conectado a la corriente para ser cargado
6	Interruptor	Modo Adulto / niño
7	Rueda de desplazamiento	Izquierda(-), derecha(+) para seleccionar tiempo de exposicion, presionar para continuar
8	Ventana del timbre	Tono de exposicion y aviso de la maquina
9	Configuracion	Seleccin del tipo de diente
10	Indicador de exposicion del equipo	Indica el estado de exposicion del equipo(verde: listo, amarillo: en exposicion)
11	Exhibidor dental	Muestra el modo del diente actual

3.2 Modo operacional

- Usando las teclas de cambio para seleccionar Adulto o Niño.
- Usando la tecla de ajuste para seleccionar la posición del diente;
- Gire la rueda del dial para agregar o disminuir el tiempo, guardar automáticamente después de la exposición

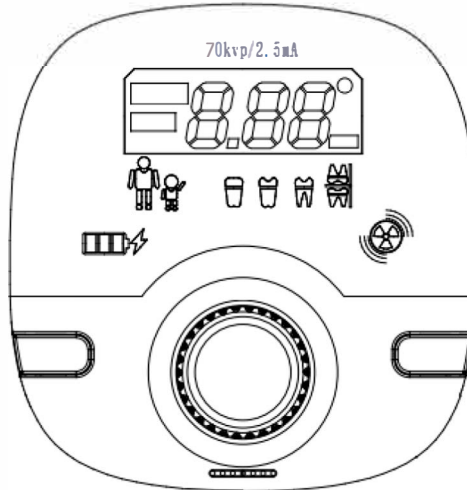

Tipo de diente

Incisivo	Canino	Molar	Oclusión

Tipo de paciente

Adulto	Niño

- Usando la rueda de ondas para ajustar el rango de tiempo: 0.1-2 seg (valor agregado mínimo: 0.1 seg);

 NOTE	La máquina lo memorizará como valor predeterminado al configurar el tiempo de exposición manualmente.
----------	---

- Después de seleccionar el tipo de paciente anterior, mantenga presionada la tecla de exposición hasta que el panel digital muestre el código de exposición y escuche un sonido de indicación. Misma operación cuando se usa el control remoto.

 IMPORTANT	La corta presión de exposición es inválida, no se producen rayos X
---------------	--